

# Passo a Passo KIT COLETA - Triagem Neonatal

## Teste do Pezinho


### FOLHA DE ETIQUETA



- **ETIQUETAS:** pequena folha contendo 1 conjunto de 5 etiquetas, devendo ser utilizada apenas **uma** em cada Kit Coleta;

1. Cole a etiqueta personalizada fornecida pelo DLE, contendo sua razão social, código e telefone;
2. Preencher os dados corretamente de maneira legível;

3. Marque o PERFIL / DOENÇAS ISOLADAS utilizando-se dos círculos ao lado dos mesmos;

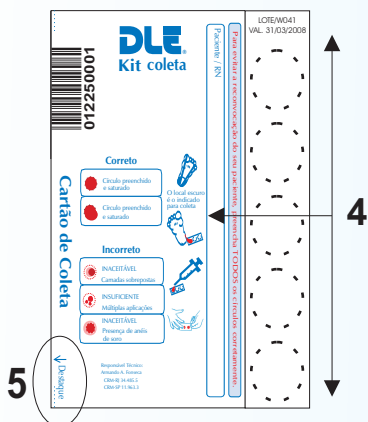


4. Colha o sangue nos círculos do papel filtro (vide figuras no cartão de coleta);
5. Destaque o CARTÃO DE COLETA, observando a seta que indica o local correto para destaque (note que ao destaca-lo, este deverá conter o código de barras);

6. Deixe o cartão secar por 2 a 4 horas à temperatura ambiente. Vire o Kit Coleta e insira o CARTÃO DE COLETA no verso do próprio Kit;
7. Retire a fita adesiva e lacre o envelope do Kit Coleta;



- DESTAQUE O PROTOCOLO (P) E GUARDE-O até receber o resultado, pois ele possui um número em conjunto com o código de barras, para o caso de consulta junto ao DLE.

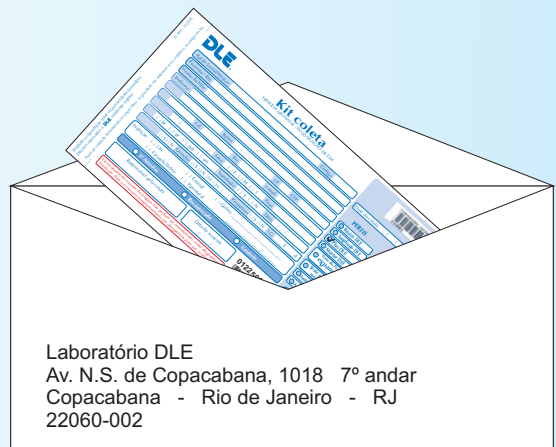

Insira o kit coleta lacrado em um envelope endereçado ao DLE.