

# Swab para coleta de teste genético

Material para coleta e transporte de células  
de raspado da mucosa oral.  
Sem valor comercial

**DLE**  
Medicina Laboratorial

## Instruções de coleta

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a coleta


**Obs.: NÃO toque na ponta da esponja localizada na extremidade da aste do swab. Tenha cuidado para que a esponja não encoste em qualquer superfície antes da coleta.**

1




O paciente **NÃO** deve comer, beber, fumar, escovar os dentes, utilizar-se de enxaguante bucal, ou goma de mascar 30 minutos antes de coletar a amostra oral.

2

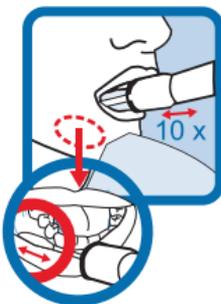

Abra a embalagem e remova o coletor sem tocar na ponta da esponja. Coloque a esponja o mais fundo possível da bochecha e esfregue ao longo da parte inferior da gengiva (veja a figura) em um movimento para frente e para trás. Esfregue a esponja na gengiva suavemente por 10 vezes. Se possível, evite esfregar nos dentes.

3

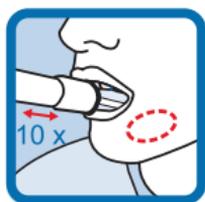

Repita esse movimento suavemente no lado oposto da boca ao longo da parte inferior da gengiva por mais 10 vezes.

4



Reintroduza o swab no frasco e pressione a tampa firmemente.

5



Insira o swab no biobag e lacre. Mantenha em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz. O material biológico estará pronto para ser enviado ao laboratório DLE. Envie para análise em até 3 dias.

**Canal do Cliente 4020-8080**

Seg. a Sex. das 08h às 18h | Ao custo de uma ligação local.

**DLE.com.br** | (11) 5907-8181 | (21) 3299-3000