

O que é o Biobox®

O Biobox® é feito para o acondicionamento e transporte de amostras biológicas seguindo as regulamentações vigentes.

CONDIÇÕES DE ENVIO

❧ Refrigeradas

Para o envio de amostras refrigeradas, deverão ser colocados no mínimo **20 sachês de gelo** para manter a condição das amostras durante o transporte.

❄ Congeladas

Para o envio de amostras congeladas, utilizar quantidade de gelo seco suficiente para completar a caixa de isopor.

☀ Ambiente

Amostras em temperatura ambiente devem ser acomodadas diretamente na caixa de isopor.

Obs.: Todas as amostras devem ser colocadas em um BIOBAG® juntamente com suas requisições.

INSTRUÇÕES DE ENVIO

1. Acomode os sachês ou o gelo seco na caixa de isopor conforme condição de envio;
2. Coloque as amostras dentro do BIOBAG® e as requisições na bolsa externa e acomode-o.
3. Feche o BIOBOX®, e está pronto para o envio.

